



**Комбинированный экспресс-тест EHRLICHIA
Ab + ANAPLASMA Ab + Боррелия Ab - это
иммунохроматографический тест для
дифференциального диагноза наличия Эрлихия Ab +
Анаплазма Ab + Боррелия Ab**

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией
перейдя по QR коду или ввести ссылку
www.ed-vet.com/video/

Принцип проведения теста

Комбинированный экспресс-тест на Эрлихию Ab + Анаплазму Ab + Боррелия Ab основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце Боррелия Ab имеется достаточно Эрлихии Ab + Анаплазмы Ab + Боррелия Ab, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Эрлихии Ab + Анаплазмы Ab + Боррелия Ab

Интерпретация результатов 15-20 минут.

Инструкция

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный экспресс-тест на Эрлихиоз Ab + Анаплазму Ab + Боррелия Ab это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Эрлихии Ab + Анаплазмы Ab + Боррелия Ab в плазме или сыворотке крови.

Время анализа: 15 - 20 минут

Образец: плазма или сыворотка крови


2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Комбинированный экспресс-тест на Эрлихию Ab + Анаплазму Ab + Боррелия Ab основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно Эрлихия Ab + Анаплазма Ab + Боррелия Ab, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Эрлихии Ab + Анаплазмы Ab + Боррелия Ab.

3. СОСТАВ НАБОРА

- 10 пакетов из фольги, каждый из которых содержит 1 тестовую кассету, 1 пипетку и 1 влагопоглотитель.
- 2 капельницы с буфером, каждая содержит по 2 мл
- Инструкция

4. ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

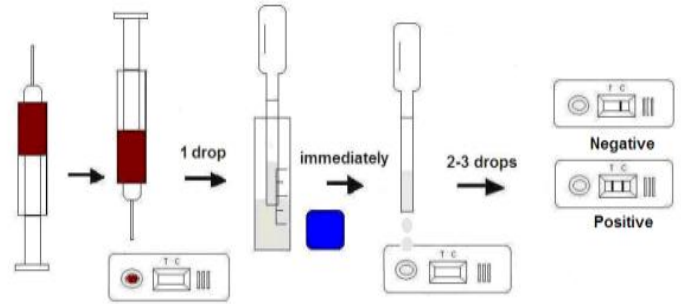


- Возьмите образец плазму или сыворотки крови.
- Достаньте кассету из пакета и положите ее горизонтально.
- Капните 1 каплю образца и немедленно добавьте 2-3 капли буферного раствора в пробоотборное отверстие «S».
- Оцените результат через 15-20 минут.

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «С» и «Т», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «С».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная.

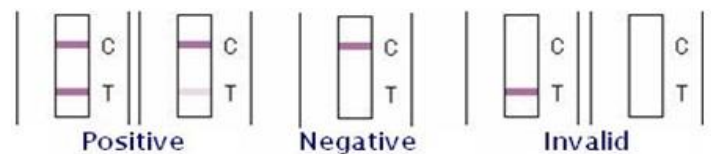

6. ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре. **НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.** Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.
- До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.
- Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.
- Не используйте повторно тест-набор.
- Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.
- Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.