



Комбинированный экспресс-тест FPV Ag + FCoV Ag - это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Панлейкопении кошек Ag + Коронавируса кошек Ag в фекалиях(ректальный смыв) или рвоте.

Принцип проведения теста

Комбинированный экспресс-тест FPV Ag + FCoV Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно FPV Ag + FCoV Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Панлейкопении кошек Ag + Коронавируса кошек Ag. Интерпретация результатов 15 - 20 минут.

Инструкция

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный экспресс-тест Панлейкопении кошек Ag + Коронавирус кошек Ag это иммунохроматографический тест для дифференциального диагноза наличия Панлейкопении кошек Ag + Коронавирус кошек Ag в собачьих фекалиях(ректальный смыв) или рвоте

Время анализа: 15 - 20 минут

Образец: фекалии(ректальный смыв) или рвота

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Комбинированный экспресс-тест на Панлейкопению кошек Ag + Коронавирус кошек Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет два испытательных окна. Каждое испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно FPV Ag + FCoV Ag, то в соответствующем испытательном окне появится видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие Панлейкопении кошек Ag + Коронавируса кошек Ag.

3. СОСТАВ НАБОРА

- 10 × пакетов из фольги, каждый из которых содержит 1 кассету, 1 пипетку;
- 10 × пробирок с буферным раствором (1.0 мл каждая)
- 10 × палочек
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку www.ed-vet.com/video/

4. ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

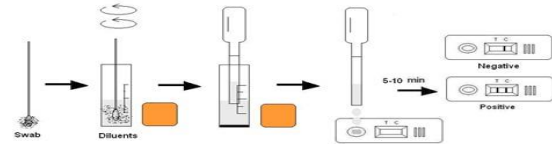

- Соберите кал или рвотные массы с помощью стержня с тампоном из заднего прохода собаки или с земли.
- Поместите мокрый тампон в имеющуюся аналитическую буферную пробирку. Встряхните ее, чтобы обеспечить хорошую экстракцию образца.
- Достаньте кассету из упаковки и положите ее горизонтально.
- Последовательно накапайте 3 капли каждого образца экстракта в пробоотборные отверстия «S».
- Оцените результат через 15 - 20 минут.

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «С» и «Т», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «С».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная.



6. ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре. Срок хранения тестового набора указан на упаковке.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.
- До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.
- Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.
- Не используйте повторно тест-набор.
- Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.
- Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.