

# Инструкция

Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, представляет собой 0,2 % раствор сухого эозина и метиленового синего в метаноле (метиловом спирте).

Стабилизированный раствор красителя обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску.

Фиксация происходит в течение 2-3 минут.

Инструкция по применению

Фиксация. Высушенные препараты фиксировать раствором Май-Грюнвальда 2-3 минуты промыть водой и высушить.

Окраска. Раствор Май-Грюнвальда развести фосфатным буфером (рН 6,4-7,0) в соотношении 1:2 - 1:3 и нанести на фиксированные (раствором Май-Грюнвальда) мазки.

Через 10-15 минут препараты промыть фосфатным буфером или водой и высушить.

Фиксированные раствором Май-Грюнвальда мазки можно окрашивать также Азур-Эозином по Романовскому.

Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов.

Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях!

Фасовка 1 л.

ТУ 9398-004-29508133-2011.