

Тест-полоски офтальмологические диагностические FluoStrips имеют краситель желтого цвета и применяются для определения эпителиальных повреждений роговицы и конъюнктивы глаза.

Для улучшения результативности теста и обеспечения комфорта пациента можно увлажнить окрашенную часть полоски в физиологическом растворе. Прикоснитесь увлажненной окрашенной частью полоски к конъюнктиве или роговице. Пациенту следует поморгать несколько раз после нанесения красителя, после чего проводится осмотр на щелевой лампе с кобальтовым фильтром.

При окрашивании роговицы: тест расценивается как положительный при обнаружении в роговичном эпителии любого количества дефектов.

Проба Норна: после окрашивания флуоресцеином пациента просят поморгать и широко открыть глаза, после чего засекают время на секундомере до момента появления первого участка разрыва окрашенной флуоресцеином слезной пленки, проявляющегося в виде «черной дыры» или щели. Норма разрыва слезной пленки 10 секунд и более.

Количество в упаковке - 100 полосок

Краситель - низкомолекулярный флуоресцеин желтого цвета

Стерильность - да

Индивидуальная упаковка полоски - да