



## Набор для тестирования S IgE у кошек РУКОВОДСТВО ПО ТОЛКОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВРУЧНУЮ Версия 1.0


### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное руководство служит для интерпретации результатов теста в ручном режиме путем сопоставления пятен, проявившихся на белковой панели, помимо уже присутствующих меток, с помощью Цветовой шкалы и Определителя.

### СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание                          | Количество |
|-------------------------------------|------------|
| Определитель                        | 1          |
| Цветовая шкала                      | 1          |
| Руководство по ручной интерпретации | 1          |

### ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

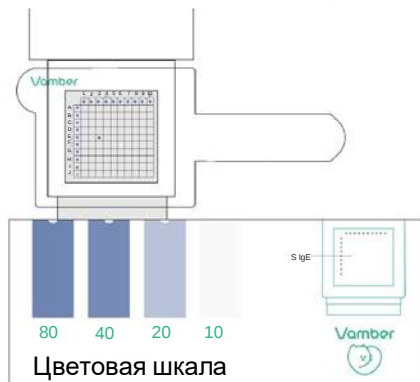

Vamber

Имя: \_\_\_\_\_  
Возраст: \_\_\_\_\_

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |
| B | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| C | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| D | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| E | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| F | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| G | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| H | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| I | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

К интерпретации результатов следует приступить спустя 15 минут после добавления субстрата на мембрану Устройства для тестирования.

1. Найдите проявившееся пятно, которое отличается от присутствующих меток, на белковой панели Устройства для тестирования.
2. Сравните пятно с цветовой шкалой, чтобы определить интенсивность сигнала, и разместите прозрачный Определитель на окошке Устройства для тестирования в правильном положении, чтобы определить положение пятна (PISA).
3. Запишите соответствующие обозначения в соответствии со следующей таблицей толкования результатов вручную на прилагаемой карточке результатов.
4. Повторите вышеуказанные 3 шага для других проявившихся пятен, пока все пятна не будут записаны в карточку результатов.

### Таблица специфических IgE

Согласно представленной цветовой шкале выделяются пять состояний, как указано в таблице ниже

| Толкование            | S IgE (ЕБ / мл) | Обозначение |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Нормальный            | $\leq 10$       | -           |
| Слегка повышенный     | 10~20           | +           |
| Умеренно повышенный   | 20~40           | ++          |
| Высокий уровень       | 40~80           | +++         |
| Очень высокий уровень | $\geq 80$       | ++++        |

ПРИМЕЧАНИЯ: Рекомендованное максимальное допустимое время интерпретации: 5 минут.