



Набор для тестирования T&S IgE для собак РУКОВОДСТВО ПО ТОЛКОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВРУЧНУЮ Версия 1.0



НАЗНАЧЕНИЕ

Данное руководство служит для интерпретации результатов теста в ручном режиме путем сопоставления пятен, проявившихся на белковой панели, помимо уже присутствующих меток, с помощью Цветовой шкалы и Определителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	Количество
Определитель	1
Цветовая шкала	1
Руководство по толкованию результатов вручную	1

ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

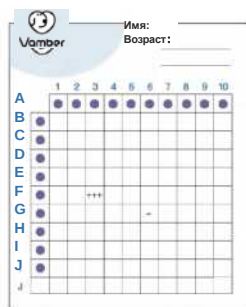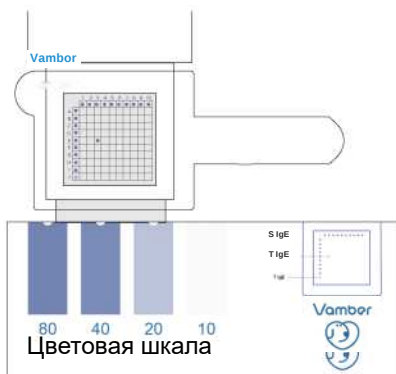

К интерпретацию результатов следует приступить спустя 15 минут после добавления субстрата на мембрану Устройства для тестирования.

1. Найдите проявившееся пятно, которое отличается от присутствующих меток, на белковой панели Устройства для тестирования.
2. Сравните пятно с цветовой шкалой, чтобы определить интенсивность сигнала, и разместите прозрачный Определитель на окошко Устройства для тестирования в правильном положении, чтобы определить положение контрольного пятна (PISA) .
3. Запишите соответствующие обозначения в соответствии с приведенной ниже таблицей толкования вручную на прилагаемой карточке результатов.
4. Повторите вышеуказанные 3 шага для других проявившихся пятен, пока все пятна не будут записаны на карточке результатов.

Таблица общего количества IgE

Пятно, отражающее общее количество IgE, находится внизу и слева
Согласно представленной цветовой шкале выделяются три состояния, как указано в таблице ниже.

Толкование	Уровень T IgE	Условные обозначения
Аномально низкий	Контрольное пятно ≤ 20	AL
Нормальный	$20 < \text{контрольное пятно} \leq 40$	N
Аномально высокий	$40 < \text{контрольное пятно}$	AN

Таблица специфических IgE

Согласно представленной цветовой шкале выделяются пять состояний, как указано в таблице ниже.

Толкование	S IgE (ЕВ/мл)	Условные обозначения
Нормальный	≤ 10	—
Слегка повышенный	$10 \sim 20$	+
Умеренно повышенный	$20 \sim 40$	++
Высокий уровень	$40 \sim 80$	+++
Очень высокий уровень	≥ 80	++++

ПРИМЕЧАНИЯ: Рекомендованное максимальное допустимое время интерпретации: 5 минут.